

# Uri-Comfort

Automatisch Urine Opvangsysteem

**Nieuw  
Product**



Als de ontvanger is geplaatst, begint het apparaat automatisch te werken zodra er urine in de slang komt. U kunt de Uri Comfort zowel liggend als zittend gebruiken. Het product helpt mensen die zich moeilijk naar het toilet kunnen verplaatsen of moeite hebben om op het toilet te gaan zitten.

Zeer gemakkelijk  
en vertrouwd in gebruik.

Neemt zorgen over lekkage weg

Aan/Uit Knop

Goede pasvorm

Ontvanger

Geen nare geurtjes

Geurfilter

Lichtgewicht en compact. Kan zowel thuis als in een zorginstelling worden gebruikt.


Ik kom niet op tijd bij het toilet...



Ik kom moeilijk op het toilet, maar...



Ik ben bang om 's nachts naar het toilet te gaan...

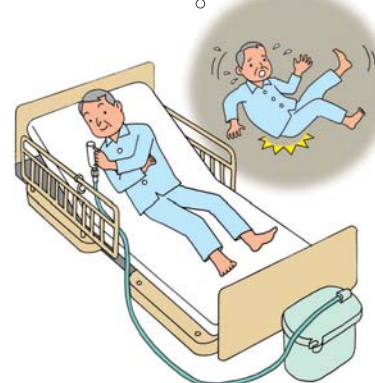


\* Gebruik een 220 V AC stopcontact.

De Uri-Comfort is een automatisch urine opvangsysteem dat is ontworpen om mensen met fysieke beperkingen te helpen om zelfstandig te urineren. Als zij aandrang voelen om te urineren, kunnen zij de ontvanger zelf of met de hulp van een verzorger plaatsen.

\* Niet geschikt voor gebruikers die zich niet bewust zijn van de aandrang om te urineren of voor continue plassende gebruikers.  
\* Niet geschikt voor gebruik met vaste afvalstoffen.

## Beschrijving van de Uri-Comfort

Als de sensor in de ontvanger urine waarneemt, begint de pomp de urine in de tank te zuigen. Dit proces stopt automatisch wanneer de sensor geen urine meer detecteert. U kunt ook op de Aan/Uit knop drukken om de motor handmatig te starten voordat u begint te urineren.

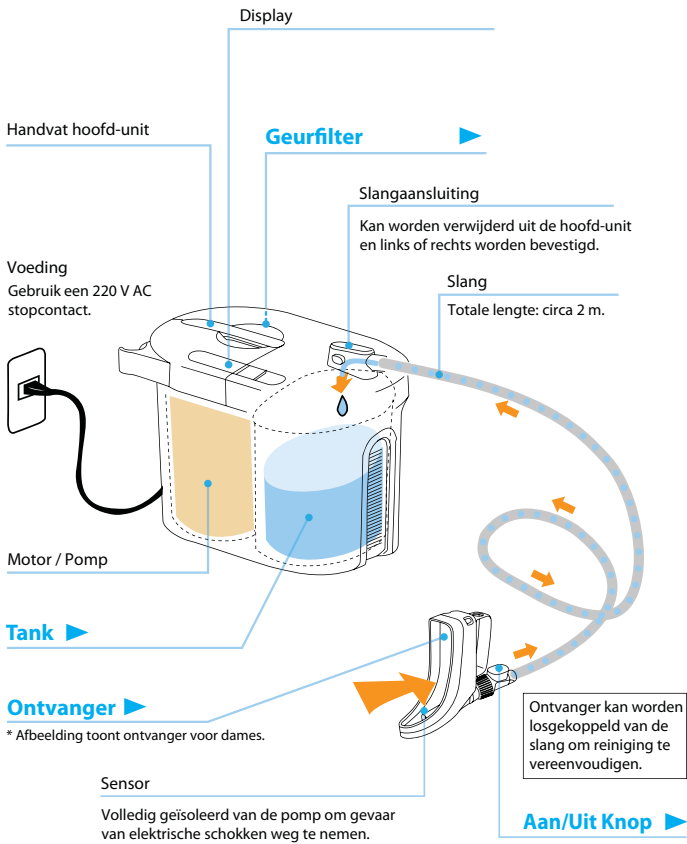

## ► Ontvanger Goede pasvorm.

De ontvanger voor heren wordt geleverd met een siliconen opzetstuk voor langdurig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het slapen. De ontvanger voor de dames heeft afgeronde onderdelen en is gemaakt van een zachter materiaal.



\* Als de ontvanger een langere tijd is aangesloten, kan jeuk en/of huiduitslag ontstaan. Zorg ervoor dat de apparatuur geregeld wordt schoongemaakt en dat de onderdelen worden ontsmet. Veeg lichaamsdelen die in contact komen met de apparatuur goed af. Vermijd nachtelijk gebruik als irritatie van de huid optreedt.

## ► Aan/Uit Knop Neemt zorgen over lekkage weg.

Nieuwe gebruikers en gebruikers die bezorgd zijn over lekkage kunnen gebruik maken van de zuigknop om de motor handmatig te starten en zodoende deze zorgen wegnemen. Ook als de sensor vuil is, kan de zuigknop worden gebruikt om te starten.



## ► Geurfilter Geen nare geurtjes.

De unit bevat een foto-katalytisch geurfilter. Het filter kan worden gewassen en opnieuw worden gebruikt. De lamp geeft aan wanneer het filter gewassen moet worden.



## ► Tank Hoeft slechts éénmaal per dag geleegd te worden.

De tank heeft een capaciteit van circa 3 liter en kan de hoeveelheid urine van 1 dag, voor een normale volwassene opslaan. Het niveau kan worden gecontroleerd zonder het deksel te openen, want een lamp en zoemer geven aan wanneer de tank vol is. De tank kan gemakkelijk worden verwijderd voor het legen en wassen ervan.



Hoofd-unit:  
KW-65E



Ontvanger voor heren:  
KW-65MRE



Ontvanger voor dames:  
KW-65WRE



### Hoofd-unit Specificaties

- Afmetingen: 38 (L) x 23.3 (B) x 27.5 (H) cm
- Gewicht: 5 kg
- Voeding: 220 V AC, 50 / 60 Hz
- Stroomverbruik: 2 W (standby), 65 W (tijdens gebruik)
- Lengte stroomkabel: circa 2.5 m

\* De ontvanger voor heren en ontvanger voor dames worden inclusief een speciale 'ophang-haak' geleverd.

**emcart reha team** 

Website URL <http://www.uri-comfort.nl>

Uw contactpersoon: Mevr. K. Harzing-Groen

T 06 520 340 93 | E [k.harzing-groen@emcart.nl](mailto:k.harzing-groen@emcart.nl)



### Veiligheidsmaatregelen

Om een veilig en juist gebruik van het product te garanderen, raden wij u aan om de handleiding voor gebruik goed door te lezen.

- De productspecificaties of -uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Door afwijkingen in het drukwerk kan de kleur van het product iets afwijken van de kleuren in deze leaflet.

J071-C00137